

PREANALYTIikka**Näytteiden vastaanottaminen ja käsittely**

Verinäyteputkien merkitseminen – HUSLABin ulkopuolinen yksikkö

Verinäyteputkien merkitseminen – HUSLABin ulkopuolinen yksikkö**Verinäyteputken täyttöaste normaali**

Viivakooditarra näyteputkessa:

1. Tarra pystysuoraan korkista alaspäin tuotetarran päälle mahdollisimman suoraan ja sileästi
2. Putkessa oleva nestepinta on näkyvissä
3. Teksti on luettavissa korkista alaspäin

**Verinäyteputken täyttöaste vajaa**

Viivakooditarra näyteputkessa:

1. poikittain putken yläosassa
2. putkessa oleva nestepinta on näkyvissä; tarra ei peitä sitä
3. tarran on oltava kokonaan kiinni putken ympärillä, reunoja **ei saa taittaa**

**Putken korkki on avattu**

1. Merkitään viivakooditarraan huomautus ”avo”.
2. Pakataan erilliseen minigrip-pussiin.

Kiireenäytteet

1. Kiireellinen näyte merkitään yliviivaamalla tarra huomiokynällä tai tulostetaan tarra värilliselle tarra-arkille.
2. Kiireelliset näytteet pakataan erilliseen minigrip-pussiin, jonka päälle laitetaan merkintä **KIIRE**.

